

Medizid® Rapid Optima

Oberflächendesinfektion



Technische Informationen

REF	Größe	Farbe	PZN
00948+	500 ml	klar, farblos	18413116

Einwirkzeiten

Bakterizid (mit Mechanik)	hohe Belastung	EN 13727, EN 16615*	5 min
Levurozid (mit Mechanik)	hohe Belastung	EN 13624, EN 16615*	5 min
Bakterizid (ohne Mechanik)	hohe Belastung	EN 13727, EN 13697	5 min
Levurozid (ohne Mechanik)	hohe Belastung	EN 13624, EN 13697	5 min
Tuberkulozid (M. terrae)	hohe Belastung	EN 14348	1 min
Begrenzt viruzid (Vaccinia Stamm Elstree, BVDV Stamm NADL)	10 % FKS	DVV / RKI	30 sek
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara) –	niedrige Belastung	EN 14476	1 min
Begrenzt viruzid PLUS	niedrige Belastung	EN 14476	15 min**
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5)	niedrige Belastung	EN 14476	15 min**
Begrenzt viruzid PLUS (Murines Norovirus)	niedrige Belastung	EN 14476	5 min
Begrenzt viruzid PLUS (Rotavirus Stamm Wa)	niedrige Belastung	EN 14476	5 min

* am Referenztuch getestet

** nicht für patientennahe Oberflächen

Allgemeine Informationen

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertige alkoholische, aldehydfreie Sprüh-/Wisch-desinfektionslösung zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie, im Lebensmittelbereich, und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten und semikritische und kritische Medizinprodukte. Nicht bestimmt für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren. Für den professionellen Gebrauch.
Anwendung	Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig benetzen und ggf. mit einem sauberen Einmaltuch verteilen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Da es sich um ein alkoholisches Desinfektionsmittel handelt, ist die Anwendung für alkoholunbeständige Flächen, wie Acrylglas und Polycarbonat, nicht zu empfehlen.
Entsorgung	Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.
Inhaltsstoffe	In 100 g sind als Wirkstoff enthalten: 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid; 43 g Ethanol

Haltbarkeit	3 Jahre Haltbarkeit im Anbruchgebinde: 12 Monate
Verpackung	18 Flaschen pro Karton, 60 Karton pro Palette Hinweis: Verkauf nur in vollen Versandeinheiten.

Regulatorische Informationen

Kategorie	Biozid Biozid Reg. Nr. N-71966 Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
-----------	--

Kennzeichnung gemäß CLP	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze/Funken/ offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
-------------------------	--

